

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

EMSAN®

NASE FREI NASENSPRAY

Medizinprodukt

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
Sie haben sich für ein hochwertiges, bewährtes Medizinprodukt entschieden! Emsan® Nase frei Nasenspray reinigt und befreit die verstopfte Schnupfennase auf natürliche Weise. Die einzigartige Mineralsalzlösung mit hypertonischer Mineralstoffkonzentration wirkt natürlich abschwellend, indem sie der Nasenschleimhaut überschüssige Flüssigkeit entzieht. Natriumhydrogencarbonat verflüssigt zähe, festsitzende Sekrete und neutralisiert entzündliche Stoffwechselprodukte.

Natürliches Quellsalz remineralisiert und revitalisiert die Nasenschleimhaut.

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten 3 g Mineralsalzmischung, gereinigtes Wasser (Zusammensetzung der Mineralsalzmischung in g/kg: Natürliches Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20).

Emsan® Nase frei Nasenspray ist garantiert frei von Konservierungsstoffen, Treibgasen und allergieauslösenden pflanzlichen Substanzen.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Zur Reinigung und Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen und verstopfter Nase.

Dosierungsanleitung:

Bei Kindern von 2–6 Jahren je nach Bedarf 3– bis 4–mal täglich einen Sprühstoß, bei Kindern ab 6 Jahren und bei Erwachsenen je nach Bedarf 3– bis 4–mal täglich 1–3 Sprühstöße in jedes Nasenloch geben. Dabei ist die Flasche möglichst senkrecht zu halten. Wir empfehlen die Verwendung des Emsan® Nase frei Nasensprays bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Vor der ersten Benutzung des Emsan® Nase frei Nasensprays die Schutzkappe abnehmen und 2– bis 3–mal pumpen, um die Luft aus der Sprühpumpe zu entfernen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich nach jedem Gebrauch den Sprühkopf trocken zu wischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen. Sollten Sie Emsan® Nase frei Nasenspray längere Zeit nicht benutzt haben, sprühen Sie den ersten Sprühstoß zur Reinigung des Adapters in die Luft. Betätigen Sie das Spray nach Anbruch regelmäßig, um einem Verstopfen der Pumpe durch Auskristallisieren von Salz entgegen zu wirken.

Gegenanzeigen:

Bisher keine bekannt.

Anwendungsdauer:

Emsan® Nase frei Nasenspray kann gemäß der Dosierungsanleitung unbegrenzte Zeit angewendet werden. Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsan® Nase frei Nasenspray nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Nebenwirkungen:

Bei Anwendung von Emsan® Nase frei Nasenspray kann es gelegentlich zu leichten Reizerscheinungen wie Brennen oder Kribbeln in der Nase, zu leichtem Nasenbluten und selten zu Kopfschmerzen kommen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie Sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Bitte beachten:

Emsan® Nase frei Nasenspray ist ohne Konservierungsmittel in einem Spezialsprühsystem abgefüllt, daher kann es nach Anbruch bis zu 6 Monate angewendet werden.

Emsan® Nase frei Nasenspray sollte nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheiten sollte das Produkt nur von einer Person verwendet werden.

Darreichungsform und Packungsgröße:

20 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase.

Erläuterung der Symbole:



Charge



Verwendbar bis



Gebrauchsanweisung beachten



Einzelner Patient – mehrfach anwendbar



Für Kinder unzugänglich aufbewahren



Die Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie werden eingehalten.



Medizinprodukt



Hersteller

Stand der Information: 2022-08



Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, Mainzer Str. 1c, DE-56130 Bad Ems
www.emcur.com · service@emcur.com